










Video guida 3DMed

Funzioni di gestione 3D

La visuale 3D è accessibile da , che permette l'interscambiabilità con la vista assiale. Al tridimensionale sono legate diverse funzioni:

-  di "Rotazione Camera" che permette di vedere in sequenza le viste assiali (superiore e inferiore), sagittali (sinistra e destra) e coronale anteriore; potendole anche scegliere dal menù a tendina accessibile dalla piccola freccia posta lateralmente all'icona 
-  di "Sezione" che consente di visualizzare diverse sezioni: assiale superiore o inferiore e cross sinistra o destra. In particolare, agendo sulla rotellina del mouse in prossimità della vista 3D è possibile visualizzare l'avanzamento dei tagli assiali; mentre eseguire la stessa azione sulle viste cross consente di osservare l'avanzamento delle sezioni cross
-  di "Trasparenza" che crea l'opportunità, agendo sul cursore dell'apposita barra, di osservare diversi gradi di trasparenza del tessuto che stiamo visualizzando. Per nascondere la barra di "Trasparenza" basta cliccare di nuovo sull'icona relativa
-  di "Filtro tessuti" che permette di osservare, attraverso i tre indicatori, i diversi tessuti del paziente. Per nascondere la barra del "Filtro tessuti" basta cliccare di nuovo sull'icona relativa



 di “*Visualizza come MIP*” che consente la visualizzazione dell'ortopantomica al posto della panoramica. È possibile accedere a questa funzione anche nella visualizzazione assiale. La MIP simula l'aspetto di una lastra ortopantomica appoggiata ad un diafanoscopio, rappresenta quindi uno strumento di utilizzo abituale ed in quanto “fissa” consente l'applicazione di alcune funzioni come lo zoom, il pan ed il cattura immagine.