







Video guida 3DMed

Impianto

La funzione “Crea Impianto” , accessibile da “Opzioni Impianti”  permette di posizionare e spostare un impianto su tutte le viste, eccezion fatta per la visuale 3D.

Dal “Database Impianti”  è possibile creare il proprio set di impianti (inserendo per ciascun impianto il produttore, il tipo e le dimensioni dell'impianto) e modificarlo anche in seguito.

Le modifiche apportate all'impianto, effettuate grazie alla funzione “Proprietà Impianto”  (icona posizionata nella griglia degli oggetti non anatomici), avvengono simultaneamente nelle visuali 2D e nel 3D e sono rese immediatamente visibili nella griglia in basso a destra, nella quale vengono riportati tutti gli elementi già inseriti (es: nervi, rialzi di seno nasale, impianti).

Inserendo un impianto il software consente di modificare indipendentemente le due parti in cui è suddiviso: fixture e abutment, ciascuna delle quali può essere ruotata indipendentemente dall'altra agendo sui pallini presenti alle estremità dei loro assi.