







# Video guida 3DMed

## Misure

La funzione “Misure”  permette di accedere a più opzioni:

-  di “*Misurazione lineare*”, cliccando con il mouse i due estremi di un segmento di cui si vuole conoscere la lunghezza
-  di “*Densità Profilo Osseo*” che fornisce informazioni relative alla diversa durezza ossea in prossimità del segmento tracciato dall'utente. La finestra descrittiva dei valori di Hounsfield si apre subito dopo aver tracciato il segmento e, una volta chiusa, è possibile consultarla di nuovo, agendo con due click consecutivi del mouse sull'etichetta “Profilo” (visualizzata in prossimità del segmento tracciato)
-  di “*Lista Misure*” che riporta tutte le misure effettuate, sia lineari che di profilo osseo
-  di “*Cancella Tutte le Misure*” che permette di eliminare tutte le misure prese precedentemente.

Se si vuole cancellare una sola misurazione, bisogna selezionare il relativo segmento, cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere l'opzione “*Cancella Misura Selezionata*” dal menù a tendina, oppure eliminarla con il tasto “*Canc*” della tastiera.