



Video guida 3DMed

Schermata Progetti




La “**Schermata dei Progetti**” si presenta suddivisa in tre aree:

- la prima è relativa ai dati del paziente,
- la seconda relativa alle informazioni della TAC ed in particolare alle singole immagini DICOM,
- la terza ed ultima parte relativa ai progetti realizzati per ciascuna serie DICOM.







Sulla destra in basso sono visibili due finestre di anteprima relative alla riga selezionata (serie o progetto):

- una consente di visualizzare le immagini assiali e di scorrerle tramite la barra in alto
- l'altra mostra il 3D del progetto se esistente relativo alla serie selezionata.

Lateralmente a sinistra si trovano una serie di comandi che consentono:

-  di Visualizzare o Nascondere i filtri che è possibile applicare per poter selezionare i pazienti a partire da diversi attributi (nome, sesso, data studio, descrizione)
-  di importare file DICOM
-  di caricare un progetto creato precedentemente



-  la visualizzazione del cestino
-  la creazione di un nuovo progetto a partire dalla serie selezionata
-  di eliminare la serie selezionata
-  di aprire il progetto selezionato, precedentemente creato
-  di esportare il progetto selezionato
-  di eliminare il progetto selezionato.