

005 Importazione file DICOM

Procediamo quindi con l'importazione dei dati DICOM del paziente.

- In alto a sinistra troviamo il pulsante **importa- file DICOM**. Cliccando abbiamo la possibilità di selezionare un percorso che può essere... in locale (quindi sul nostro PC) oppure anche un percorso di rete.
- Ovviamente l'importazione dei dati attraverso la rete sarà condizionato dalla velocità della nostra rete e quindi un po' più lento.
- Cliccando sul tasto **refresh** (in basso a sx nella nuova finestra) il programma va a leggere tutti i dati DICOM presenti nel percorso selezionato.
- A questo punto se clicco sul **tasto centrale** importo tutti i dati presenti.
- Diversamente posso selezionare uno o più pazienti. In questo caso seleziono il primo, con il tasto sinistro, e cliccando il tasto **ctrl+tasto sinistro** posso selezionare uno ad uno i successivi o deselectionarli.
- Una volta che il programma ha terminato il caricamento dei dati si posiziona automaticamente sull'ultimo paziente acquisito e a questo punto ho la possibilità di visualizzare la **Serie** ed alcuni dati ad essa connessi come il numero di immagini o lo spessore di acquisizione.
- Se torno nuovamente sulla funzione **Importa - file DICOM** vedrò che i pazienti precedentemente caricati all'interno del programma sono ora spuntati ✓. Quindi posso procedere alla selezione degli ulteriori pazienti presenti nel percorso o uscire da questa funzione.