

007 cancellazione del Progetto e della Serie dei dati del paziente

In qualsiasi momento è possibile eliminare per sempre i dati della TC di un paziente dal mio computer.

Per fare questa operazione devo eliminare la **Serie** e di conseguenza il **Progetto** del paziente.

- Procedo individuando il paziente, e selezionandolo.
- A questo punto clicco sull'icona **Elimina Serie Selezionata**. Il programma mi chiede se sono sicuro dell'eliminazione, poi mi chiede se sono al corrente che eliminerò anche il progetto, dò l'ok e a questo punto il paziente è stato eliminato o meglio quasi eliminato.
- Se infatti vado nel cestino troverò che il paziente è ancora all'interno del mio programma sia come Serie che come Progetto. Posso a questo punto decidere di ripristinarlo oppure di eliminarlo per sempre.
- Per eliminarlo basterà semplicemente cliccare sull'icona **Svuota Cestino** e l'intero cestino si svuoterà definitivamente.
Oppure se voglio recuperare il dato, clicco sulla **Serie**, clicco su **Ripristina File Selezionato** e la serie viene recuperata. La stessa cosa la posso fare per il **Progetto** che, una volta selezionato e Ripristinato avrà in automatico recuperato anche la serie collegata.
- Se per un paziente è stato fatto più di un progetto è ovviamente possibile cancellare anche il singolo progetto cliccando sullo stesso e successivamente sul pulsante a sinistra **Elimina Progetto Selezionato**.