

## 065 Strumenti per la comunicazione con il paziente

Una volta disegnato il canale mandibolare e posizionati gli impianti ho a disposizione degli strumenti di fortissimo impatto per la comunicazione con il paziente.

Partiamo dalla visualizzazione 3D immagine sempre molto forte e comunicativa. Cliccando sul pulsante in basso a sinistra **Visualizzazione 3D/assiale** posso inserire o disinserire il 3D.

- Poco più a destra posso poi vedere un altro strumento ovvero lo **Strumento sezione** che mi permette di sezionare il 3D in diversi modi.
  - Sezione Assiale Superiore
  - Sezione Assiale Inferiore
  - Sezione Cross Sinistra
  - Sezione Cross Destra

Se per esempio utilizzo la sezione Cross (destra o sinistra) è possibile, così facendo, **scorrere** le immagini **Cross** (scrollando con la rotellina del mouse) ed andare a visualizzare **nel 3D** impianti, canale e radici e il rapporto che esiste tra gli stessi. Uno strumento di impatto molto forte e comunicativo di grande utilità didattica anche nella rimozione degli ottavi o di cisti e altre anatomie.

- Poco più a destra ancora posso poi vedere un'altra funzione, ovvero lo strumento **Trasparenza** che mi permette di variare la trasparenza dell'osso. Una volta cliccato sulla relativa icona mi compare un cursore. Muovendo questo cursore l'osso diventa sempre più trasparente a beneficio della visualizzazione del canale e degli impianti.  
Estremizzando posso arrivare a eliminare completamente l'osso e a vedere solamente impianti e canale mandibolare.
- Questi strumenti di navigazione 3D uniti al 3D stesso sono elementi di forte impatto emotivo e altissimo livello comunicativo anche a scopo didattico e nei rapporti con i pazienti che possono usufruire anche di un report di stampe utili per il consenso informato.